

CICHO wSZA wyczeska grzebień do włosów



Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	1 szt
Postać	Sprzęt medyczny
Producent	ALBERT POLSKA
Rodzaj rejestracji	Sprzęt medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Charakterystyka

- Grzebień ze stali nierdzewnej to kolejny produkt z linii **CICHO wSZA**. Jest idealnym uzupełnieniem dla szamponu i gumek.
- Grzebień posiada system delikatnych podwójnych kanalików, który pozwala skutecznie i dokładnie zbierać gnidy i wszy.
- Ponadto jest delikatniejszy dla włosów. Antypoślizgowy uchwyt pomaga łatwo trzymać grzebień.
- Cały grzebień jest wykonany ze stali. Końcówki grzebienia są zespawane z jego uchwytem, co pozwala na dezynfekcję przez gotowanie bez utraty właściwości produktu. Zaokrąglone końcówki stalowej wyczeski zapobiegają uszkodzeniu skóry głowy i struktury włosów.

Stosowanie

Najpierw myjemy włosy np. szamponem CICHO wSZA, osuszamy je ręcznikiem i dzielimy na mniejsze pasemka. Wyczesujemy włosy ostrożnie pasmo po pasmie grzebieniem CICHO wSZA od skóry głowy do końcówek włosów. Płuczemy grzebień po każdym przeczesaniu pasma włosów. Osuszamy wyczeskę papierowym ręcznikiem, upewniając się, że usunięte zostaną wszystkie wszy lub gnidy przymocowane do grzebienia. Po dokładnym wyczesaniu zalecamy ponowne umycie włosów. Można ponownie użyć szamponu CICHO wSZA, aby wzmocnić efekt działania. Sprawdzamy ponownie już wysuszone włosy. Jeśli nadal widzimy na włosach wszy lub gnidy, powtarzamy czynności.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.