

Pieluchomajtki Super Seni XS x 10 szt



Cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	10 szt
Postać	Pieluchomajtki
Producent	TZMO
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Pieluchomajtki Super Seni XS to wyrób medyczny przeznaczony zarówno dla pacjentów z ograniczoną mobilnością, jak i dla tych, którzy pozostają w pełni aktywni. **Pieluchomajtki Super Seni XS** to produkt skierowany do osób z nietrzymaniem moczu oraz/lub kału w stopniu średnim.

Pieluchomajtki Super Seni gwarantują komfort użytkowania – są wygodne, chłonne, dyskretne, nie przeciekają i nie powodują odparzeń.

Pieluchomajtki Super Seni są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by informować o konieczności zmiany produktu na świeży – wszystko dzięki identykatorowi wilgotności. Model **pieluchomajtek Super Seni** posiada też zabezpieczenia przed przeciekaniem (dopasowujące się do ciała boczne osłonki). Struktura warstwy zewnętrznej pozwala natomiast skórze oddychać, chroniąc ją przed odparzeniami i podrażnieniami. Ponadto do produkcji **pieluchomajtek Super Seni** wykorzystano superabsorbent, który oprócz świetnej chłonności, wykazuje właściwości antybakteryjne, co z kolei przekłada się na ograniczenie powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Opakowanie wyrobu medycznego **Pieluchomajtki Super Seni XS** zawiera 10 sztuk produktu w najmniejszym rozmiarze w ofercie marki Seni.

Charakterystyka

Pieluchomajtki Super Seni to oddychające pieluchomajtki "dienne" przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności ze średnim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości, zapobiegają podrażnieniom i odparzeniom. Gwarantują wygodę i duży komfort użytkowania.

Właściwości **pieluchomajtek Super Seni**

- Zwiększone poczucie suchości - specjalna włóknina rozpraszająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym umożliwia szybsze i dokładniejsze rozpraszanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfortowe poczucie suchości.
- Zapobieganie przeciekaniu – osłonki boczne wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci

na zewnątrz pieluchy. Po założeniu pieluchomajtek osłonki idealnie dopasowują się do ciała.

- Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej pieluchomajtek umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się również ryzyko powstania odleżyn. Specjalna oddychająca włóknina została również zastosowana w skrzydłach bocznych pieluchomajtek, zapewniając w ten sposób swobodną cyrkulację powietrza w części biodrowej wyrobu.
- Informacja o konieczności zmiany pieluchy - indykator wilgotności w formie nadruku lub kolorowych pasków informuje o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się, a w przypadku pasków zmienia się ich kolor na niebiesko-zielony. Rozmycie nadruku lub zmiana koloru indykatora na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany pieluchy.
- Redukcja nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w pieluchomajtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie przykrego zapachu.
- Lepsze dopasowanie do ciała i zwiększona swoboda ruchu - idealne dopasowanie do ciała możliwe jest dzięki zastosowaniu przylepcorzepów i elastycznego ściągacza taliowego znajdującego się w przedniej i tylnej części pieluchomajtek. Dzięki połączeniu tych cech pieluchomajtki są elastyczne na całym obwodzie, co zapewnia większą swobodę ruchów oraz poczucie komfortu. Po odpięciu przylepcorzepy nie odkształcają się, więc możliwe jest ich wielokrotne użycie. Dodatkowo dzięki anatomicznemu kształtowi pieluchomajtki dopasowują się do ciała użytkownika, zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych.
- Zachowanie dyskrecji i wygody – zwężony wkład chłonny w kroku z obrzeży do części środkowej sprawia, że pieluchy lepiej dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności.
- Podwyższony komfort użytkownika – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie korzystania z pieluchomajtek.
- Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu pieluchomajtki Super Seni mają elementy z elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórniego. **Pieluchomajtki Super Seni** poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym.

Pieluchomajtki Super Seni to klasyczne, oddychające pieluchomajtki zapinane na rzepy przeznaczone dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności.

Rozmiar XS: obwód 40-60 cm

Stosowanie

Przed założeniem **pieluchomajtek Super Seni XS** należy je rozłożyć, chwycić za dwa końce (po długości) i lekko pociągnąć. Następnie należy złożyć **pieluchomajtki Super Seni** na pół i również lekko naciągnąć. To tzw. aktywacja pieluchomajtek – pomaga ona uzyskać maksymalną chłonność i miękkość produktu.

Pieluchomajtki Super Seni XS – zakładanie samodzielne:

- trzymając pieluchomajtki w formie łódki, włóż je między nogi i dopasuj, by przylegały do ciała
- zapnij **pieluchomajtki Super Seni** przy pomocy rzepów (rozpoczynając od zapięcia na dole) kierując je lekko ku górze. Górnymi rzepami dopasuj **pieluchomajtki Super Seni** do talii
- upewnij się, że produkt w żadnym miejscu nie wpija się w ciało, a boczne osłonki nie są podwinięte.

Pieluchomajtki Super Sani XS – zakładanie osobie leżącej:

- stojąc obok łóżka, zegnij w kolanie jedną nogę chorego, a następnie obróć go na bok. Podłóż **pieluchomajtki Super Sani XS** z tyłu chorego, tuż pod wysokością bioder, po czym odwróć go z powrotem na plecy i wyprostuj mu nogi
- wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek
- wyciągnij pomiędzy nóg chorego przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza
- zapnij **pieluchomajtki Super Seni** przy pomocy rzepów (rozpoczynając od zapięcia na dolnego) kierując je lekko ku górze (zapnij rzepy pod kątem). Górnymi rzepami dopasuj **pieluchomajtki Super Seni** do talii chorego
- upewnij się, czy pielucha odpowiednio przylega do ciała, nie wpijając się w nie. Pamiętaj, by sprawdzić również osłonki boczne – nie mogą one być zawinięte.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Galeria

